

Kasutusjuhend

1. Palun lisage vedelik enne toote tööle panemist.
2. Palun täitke veepaak, mis asub toru poolisel küljel.
3. Palun puhastage seade peale igat kasutamist.
4. Palun hoidke seade ja selle tarvikud kuivana peale igat kasutamist.
5. Kasutatud vesi voolab ilma toruta veepaaki. Peale nina loputamist, palun valage kasutatud vesi paagist välja.
6. Palun laadige seadet vähemalt 30minutit enne esimest kasutamist.

Töö etapid

Pilt 1. Keerake veepaaki vastupäeva.

Pilt 2. Avage loputusotsik ja kate.

Pilt 3. Täitke torupoolne veepaak ninaloputusveega (füsioloogilise lahusega) – vähemalt 2ml (alla 25ml)

Pilt 4. Asetage loputusotsik, kate ja veepaak tagasi masina põhiosa külge.

Pilt 5. Kallutage pead ettepoole ja asetage loputusotsik ühele ninasõõrmele. Vajutage nuppu, et aktiveerida madal pihustustase. Vajutage + nuppu, et lülitada seade kiireks pihustuseks.

Pane tähele! Kasutatud vesi voolab ilma toruta veepaaki. Peale nina loputamist, palun valage kasutatud vesi paagist välja.

Laadimine

Pane tähele! Enne laadimist veenduge, et pistikus on vol.

Pane tähele ! Seda seadet tuleb laadida iseseisvalt, palun ärge kasutage laadimiseks teisi elektroonilisi seadmeid.

Puhastamine ja desinfitseerimine

Puhastamine

Pilt 1. Täitke veepaak jahutatud veega, et eemaldada jäägid paagist.

Pilt 2. Eemaldage veepaak, loputusotsik ja kate masina põhiosast ning loputage need sooja veega.

Pilt 3. Peale puhastamist kasutage meditsiinilist marlit, salvrätti või kuiva riiet, et eemaldada niiskus. Kuivatage hoolikalt.

Pilt 4. Puhastage seade väljastpoolt meditsiinilise marli, salvrätiku või kuiva riidega.

Pilt 5. Hoidke seadet kuivas ja puhtas keskkonnas, et vältida saastumist.

Desinfitseerimine

- 1) Majapidamisvalgendiga desinfitseerimine. Lisage valgendit veepaaki ning laske sel töötada kuni vedelik on ära kasutatud. Pange paaki puhas vesi ning tehke sama tsükkel läbi 3-4 korda – nii kaua kuniks vedelikul ei ole valgendi lõhna.
- 2) Äädikaga desinfitseerimine. Leotage loputusotsikut 30 minutit lahuses, mis koosneb 1 osast äädikast ja 3 osast kuumast veest. Pange paaki puhas vesi ning tehke sama tsükkel läbi 3-4 korda – nii kaua kuniks vedelikul ei ole äädika lõhna. Kuivatage kõik osad täielikult.
- 3) Vesinikperoksiidiga puhastamine. Leotage loputusotsikut 30 minutit lahuses, mis koosneb 1 osast vesinikperoksiidist ja 3 osast kuumast veest. Pange paaki puhas vesi ning tehke sama tsükkel läbi 3-4 korda – nii kaua kuniks vedelikul ei ole lõhna. Kuivatage kõik osad täielikult.

Detailse info jaoks lugege kasutusjuhendit.